


スマートスロープ SMART SLOPE

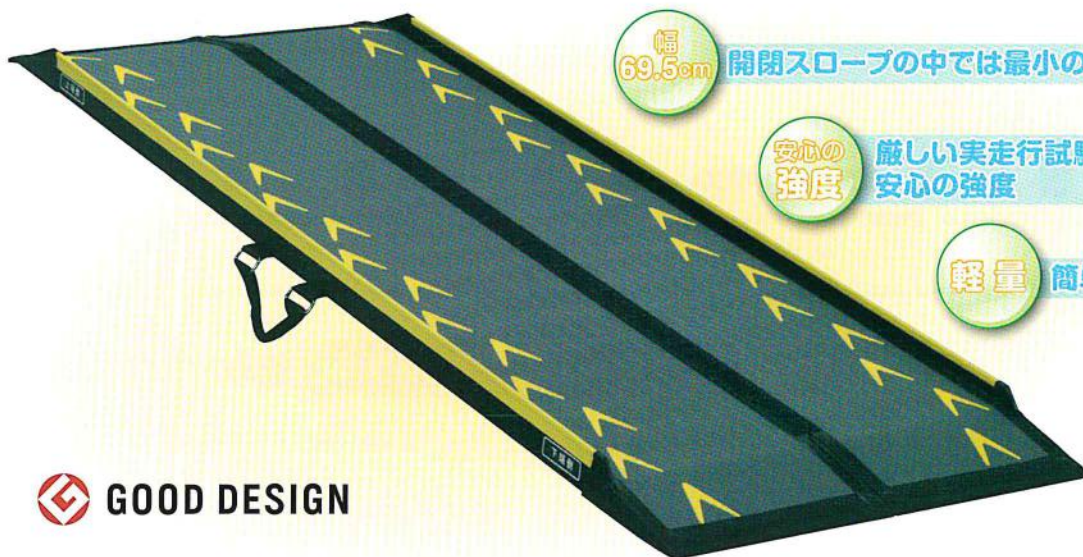

幅 69.5cm 開閉スロープの中では最小の細身設計

安心の強度 厳しい実走行試験をクリアした安心の強度

軽量 簡単に持ち運びができる

GOOD DESIGN

スマートスロープ

商品番号	月額レンタル価格	ご利用者様負担額			
CA-S075	¥ 4,500	1割 ¥ 450	2割 ¥ 900	3割 ¥ 1,350	
重量	約5kg	最大段差	18cmまで	安全荷重量	300kg
長さ×幅	75 × 69.5cm				
TAIS	00496-000303	メーカー名	ランダルコーポレーション		
CA-S100	¥ 5,000	1割 ¥ 500	2割 ¥ 1,000	3割 ¥ 1,500	
重量	約6kg	最大段差	24cmまで	安全荷重量	300kg
長さ×幅	100 × 69.5cm				
TAIS	00496-000297	メーカー名	ランダルコーポレーション		
CA-S125	¥ 5,000	1割 ¥ 500	2割 ¥ 1,000	3割 ¥ 1,500	
重量	約8kg	最大段差	31cmまで	安全荷重量	300kg
長さ×幅	125 × 69.5cm				
TAIS	00496-000298	メーカー名	ランダルコーポレーション		
CA-S150	¥ 6,000	1割 ¥ 600	2割 ¥ 1,200	3割 ¥ 1,800	
重量	約9kg	最大段差	37cmまで	安全荷重量	300kg
長さ×幅	150 × 69.5cm				
TAIS	00496-000299	メーカー名	ランダルコーポレーション		

商品番号	月額レンタル価格	ご利用者様負担額			
CA-S175	¥ 6,000	1割 ¥ 600	2割 ¥ 1,200	3割 ¥ 1,800	
重量	約10kg	最大段差	44cmまで	安全荷重量	300kg
長さ×幅	175 × 69.5cm				
TAIS	00496-000300	メーカー名	ランダルコーポレーション		
CA-S200	¥ 7,800	1割 ¥ 780	2割 ¥ 1,560	3割 ¥ 2,340	
重量	約11kg	最大段差	50cmまで	安全荷重量	300kg
長さ×幅	200 × 69.5cm				
TAIS	00496-000301	メーカー名	ランダルコーポレーション		
CA-S225	¥ 8,000	1割 ¥ 800	2割 ¥ 1,600	3割 ¥ 2,400	
重量	約14kg	最大段差	56cmまで	安全荷重量	300kg
長さ×幅	225 × 69.5cm				
TAIS	00496-000304	メーカー名	ランダルコーポレーション		
CA-S250	¥ 9,000	1割 ¥ 900	2割 ¥ 1,800	3割 ¥ 2,700	
重量	約18kg	最大段差	63cmまで	安全荷重量	300kg
長さ×幅	250 × 69.5cm				
TAIS	00496-000305	メーカー名	ランダルコーポレーション		

車いす用スロープ セレクトガイド

段差の高さ	スロープの長さ																			
	25cm	41cm	44cm	58cm	75cm	90cm	100cm	120cm	125cm	140cm	150cm	175cm	180cm	185cm	200cm	210cm	225cm	240cm	250cm	
58 ~ 72cm																				
44 ~ 58cm																				
35 ~ 44cm																				
27 ~ 35cm																				
21 ~ 27cm																				
16 ~ 21cm																				
12 ~ 16cm																				
9 ~ 12cm																				
7 ~ 9cm																				
5 ~ 7cm																				
4 ~ 5cm																				
3 ~ 4cm																				
1 ~ 3cm																				
スマートスロープ							CA-S075	CA-S100	CA-S125	CA-S150	CA-S175				CA-S200	CA-S225	CA-S250			

スロープをお選びになる際のポイント

車いすで走行しやすいスロープの傾斜角度



理想的には5度以下または8度~13度(10度以下)の角度が望ましいのですが、段差、スペース等の都合で16度以上でご使用の場合は設置及び走行に十分ご注意ください。

- 16~20度** 後方に転倒する可能性があります。条件付きで成人男性が押せる角度。
- 12~17度** 押すのに困難ですが、成人男性なら押せる角度。電動車いすの場合は一人での走行は避けてください。
- 8~13度** 成人女性、または男性が一人で押せる角度。
- 5~9度** 普通の高齢女性が一人で押せる角度。
- 5度以下** 自走もでき、楽に押せる理想の角度。