

セーフティーアーム[®]は全部で約

リハビリにより歩行する力が向上するなど、お身体の状態が変わると、使いやすい歩行器も変わります。リハビリから日常生活へ・・・お身体の状態・使用場所・目的などに合わせ、よりご利用者様に合った歩行器を選択しましょう。



歩行訓練に



通院・お散歩に



セーフティーアーム
詳細は P.17 へ

セーフティーアーム交互式
詳細は P.18 へ



セーフティーアーム
Vタイプウォーカー
詳細は
P.5~8 へ



セーフティーアーム
ウォーカーCタイプ
詳細は
P.13 へ



セーフティーアーム
ウォーカーGタイプ
詳細は
P.15 へ



セーフティーアーム
ウォーカーMタイプ
詳細は P.14 へ

セーフティーアーム
UXタイプウォーカー
詳細は P.9~10 へ



セーフティーアーム
ウォーカーLタイプ
詳細は
P.16 へ

リ
ハ
ビ
リ

セーフティーアーム[®]の特徴 前頁のチェックポイントも併せてご覧ください。



セパレートグリップ

下側からビス固定しているタイプで、ドライバーでかんたんに交換OK。



波型グリップ

手にフィットしやすい形状で、手の疲労を軽減します。



縦型グリップ

握りやすいシンプルな縦型タイプ。



ハンドルブレーキ

ブレーキレバーを握ると作動します。パーキングブレーキ付き。



荷重ブレーキ

上から歩行器に荷重をかけるとストッパーが作動します。

40種類



例えば
家事支援に



セーフティーアーム
ロレータキャリー
詳細は
P.25~26へ

休憩もできる
長距離移動に



セーフティーアーム
ロレータポケット
詳細は
P.21~22へ

日常生活



セーフティーアーム
ロレータキャリーUタイプ
詳細は
P.28へ



セーフティーアーム
ロレータ
詳細は
P.27へ



歩行する力が向上
すると活動範囲が
広がります。

40種類もあるから、
ご利用者様に合った
ものが見つかると思
います。



セーフティーアーム
ロレータSPタイプ
詳細は
P.23~24へ

キャスター



折りたたみ



スイングキャスター

360度回転するので小
回りがきき、方向転換が
スムーズ。

ストレートキャスター

一方に固定されている
ので、ゆっくり少しずつ
進みたい方に。

※セーフティーアームウォーカー
Cタイプのみ

2段グリップ

床からの立ち上がり便
利な下段グリップ付き。

反射板

歩行者の存在をアピール
する反射板付き。夕暮れ
時や夜間などにも安心。

コンパクト収納

歩行車タイプは、奥行
きがコンパクトになる
折りたたみ。

コンパクト収納

歩行器タイプは、左右の
フレームを交互に折り
たたみます。

セーフティーアーム® Vタイプウォーカー

ハンドルブレーキで自分のペースで進めるシンプルな歩行器

ブレーキレバーを握りブレーキ操作し、ご自身のペースにあった歩行をサポートします。ブレーキレバーを下げるとパーキングブレーキが作動、信号待ちなどで立ち止まる際にも安心です。パーキングブレーキは握り直すと解除できます。

■使用方法

- 1 左右のグリップとブレーキレバーをしっかり握る。
- 2 ブレーキレバーをゆるめ、歩行器を前に出す。
- 3 ブレーキレバーをしっかり握り、ブレーキを作動させる。(歩行器固定)
- 4 身体を少しずつ移動する。

2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

NEW

スリムタイプが新登場!

2021年12月販売開始予定

セーフティーアーム® Vタイプウォーカースリム

従来のセーフティーアームVタイプウォーカー(SAV)と比べて、全幅が5cmスリムになりました。男性にも女性にもおすすめの歩行器です。



スタンダードタイプと比べて

-5cm

全幅

58.5cm



スリムサイズで、 使用が広がります。

グリップ幅が広すぎて歩行器に荷重が掛けにくい場合にスリムサイズは使用しやすいサイズです。

■室内使用に

廊下幅やドアの幅など、限られたスペースでも使用しやすくなりました。

■屋外使用に

屋外の狭い歩道でも使用しやすく、折りたたむとコンパクトになるので、バスなどに乗りお出かけにもおすすめです。

リーズ



男性も女性もおしゃれな気分でお出かけしてみませんか？

歩行車と比べて、座面やかごなどの機能を省くことで軽く、歩行サポートを重視したシンプルなデザイン。お洋服の色にも合わせやすいシックなブラックカラーでフレームやパーツを統一しています。男性にも女性にも、幅広い身長の方におすすめの歩行器です。

使用者身長(目安)

145~170cm
程度



お出かけに便利な機能

脚先調節



脚先パイプをスライドさせ
プッシュボタンで固定します。
グリップ高さ75~85cmの
5段階調節(2.5cmずつ)です。

反射板



夕暮れや夜間に歩行する時
に歩行者の存在をアピールす
る反射板が付いています。

スイングキャスター



溝などにはまりにくく、屋外
での使用に便利。小回りが
きき、スムーズな歩行をサ
ポート。

コンパクト収納



収納・持ち運び・車
への積み込みなどに
便利。



レンタル業者様におすすめです。

1機種で男性も女性も対応できるので、様々な機種を持つ必要がなく、在庫管理が楽になり便利です。

Vタイプウォーカーは全部で4タイプあります。
サイズなどの詳細については、次のページへ ▶▶▶

セーフティーアーム® Vタイプウォーカー

貸

介護保険適用
レンタル対象

室内はもちろん、屋外での歩行もサポートする機能を備え、シンプルな形状の歩行器です。
お身体や好みに合わせて、4タイプから選択できます。お散歩や通院などにもおすすめです。

■スリムタイプ NEW



■ハイトタイプ



①Vタイプウォーカースリム

¥30,000 (非課税)

品番:SAVA 重量:4.9kg
収納時サイズ:W59×D12×H78cm
カラー:ブラックのみ

使用者身長(目安)

145~170cm 程度

車輪サイズ

前輪...7インチ(18cm)
後輪...5インチ(12.5cm)

②Vタイプウォーカーハイ

¥30,000 (非課税)

品番:SAVH 重量:5kg
収納時サイズ:W63×D15.5×H85cm
カラー:ブラックのみ

使用者身長(目安)

160~180cm 程度

車輪サイズ

前輪...7インチ(18cm)
後輪...5インチ(12.5cm)



コンパクト収納

収納・持ち運び・車への積み込みなどに便利。



薄型・コンパクトに折りたたまみができるので、お出かけ、通院などの際にも持ち運びしやすく便利です。

シンプルだから使いやすい
カゴや座面が付いていないシンプルな形状のため、軽量で取り回しもしやすい歩行器です。
シルバーカーや機能の多い歩行器には抵抗が...という方にもおすすめです。





室内・
屋外用



ハンドル
グリップ



4サイズあり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。(詳細はP.1~4を参照ください。)



セパレート
グリップ



ハンドル
ブレーキ



反射板



スイング
キャスター



2段
グリップ



コンパクト
収納

■スタンダードタイプ



■ミニタイプ



③Vタイプウォーカー

¥28,500 (非課税)

品番:SAV 重量:4.9kg
収納時サイズ:W63×D11×H75cm
カラー:シルバーのみ

使用者身長(目安)

145~170cm 程度

車輪サイズ

前輪・・・**7インチ**(18cm)

後輪・・・**5インチ**(12.5cm)

④Vタイプウォーカーミニ

¥28,500 (非課税)

品番:SAVS 重量:4.4kg
収納時サイズ:W59.5×D13.5×H71.5cm
カラー:シルバーのみ

使用者身長(目安)

135~160cm 程度

車輪サイズ

前輪・・・**5インチ**(12.5cm)

後輪・・・**5インチ**(12.5cm)



コンパクト収納

収納・持ち運び・車への
積み込みなどに便利。



| | 商品名 | カラー | 品番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|-----------------------|------|------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームVタイプウォーカースリム | ブラック | SAVA | ¥30,000(非課税) | 4515914-400618 | 00465-000112 | ③ |
| ② | セーフティーアームVタイプウォーカーハイ | ブラック | SAVH | ¥30,000(非課税) | 4515914-300383 | 00465-000110 | |
| ③ | セーフティーアームVタイプウォーカー | シルバー | SAV | ¥28,500(非課税) | 4515914-300116 | 00465-000055 | |
| ④ | セーフティーアームVタイプウォーカーミニ | シルバー | SAVS | ¥28,500(非課税) | 4515914-300529 | 00465-000103 | |

【材質】 本体:アルミ、センターシャフトのみスチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム

※セーフティーアームVタイプウォーカーには、セーフティーアームウォーカーシリーズ専用アクセサリなどの取り付け・共有できません。

セーフティーアーム® Uタイプシリーズ (アームレ

前腕でしっかり身体を支えるアームレストタイプ

前腕部をアームレストにのせて、より歩行器に体重をかけて使用することができます。リウマチなどで手に変形や疼痛がある方や握力の弱い方にもおすすめです。

大型アームレストタイプのロレータキャリーUタイプもあります。詳細はP.28へ

■使用方法

- 1 ハンドルとブレーキレバーを握り、前腕をアームレストにのせる。
 - 2 ブレーキレバーをゆるめ、歩行器前に出す。
 - 3 ブレーキレバーをしっかり握り、ブレーキを作動させる。(歩行器固定)
 - 4 身体を少しずつ移動する。
- 2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

セーフティーアーム® UXタイプウォーカー

貸

介護保険適用
レンタル対象

全幅60cmとコンパクトで、軽量のため、ご自宅などでも使用しやすい前腕支持タイプです。薄型に折りたたみすることができます。そのため、持ち運びやすく、車へ積んでデイサービスへ出かける時や通院などにも便利です。

■スタンダードタイプ




■ハイトタイプ



ストタイプ)



室内専用

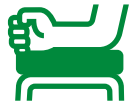

アームレスト



2サイズあり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。(詳細はP.1~4を参照ください。)



縦型グリップ



ハンドル
ブレーキ



スイング
キャスター



2段グリップ



コンパクト収納

①UXタイプウォーカー

¥37,000 (非課税)

品番:SAUX 重量:5.8kg
収納時サイズ:W61×D25×H91cm


使用者身長(目安)

135~160cm 程度

車輪サイズ

前輪...**5インチ**(12.5cm)

後輪...**5インチ**(12.5cm)

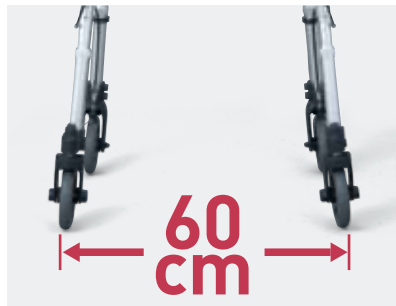

スリム構造

全幅60cmとスリムサイズなので、在宅などの限られたスペースでの使用におすすめ。

②UXタイプウォーカーハイ

¥39,000 (非課税)

品番:SAUXH 重量:6.5kg
収納時サイズ:W59×D26×H102cm

使用者身長(目安)

160~180cm 程度

車輪サイズ

前輪...**7インチ**(18cm)

後輪...**5インチ**(12.5cm)



開閉パイプ
プッシュボタン



脚先パイプ
プッシュボタン

ダブルロック

開閉用と高さ調節用のプッシュボタンは輪ネジ付きのダブルロック。しっかり固定されるので安心です。



コンパクト収納

収納・持ち運び・車への積み込みなどに便利。



| | 商品名 | 品番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|-----------------------|-------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームUXタイプウォーカー | SAUX | ¥37,000(非課税) | 4515914-300246 | 00465-000067 | |
| ② | セーフティーアームUXタイプウォーカーハイ | SAUXH | ¥39,000(非課税) | 4515914-300284 | 00465-000109 | ① |

[材質] 本体:アルミ、センターシャフト・ハンドル:スチール、下段グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム、アームレスト:ウレタン
※セーフティーアームUXタイプウォーカーには、セーフティーアームウォーカーシリーズ専用アクセサリなどの取り付け・共有できません。

セーフティーアーム®ウォーカーと 選び方について

長期にわたり歩行器を使用すると、ご利用者の状態が変わり、歩行器がお身体に合わなくなる場合がありますが、セーフティーアームウォーカーシリーズは、本体サイズ・脚先セットを交換して18種類の歩行器となるので、歩行器を買い換える手間が省けるのでおすすめです。




| | ゆっくり歩行 | | スムーズ歩行 | | |
|------|---|---|--|--|--|
| タイプ | 固定式タイプ 4サイズ <ul style="list-style-type: none"> ●ハイタイプ ●スタンダードタイプ ●ミニタイプ●SSタイプ | Cタイプ 4サイズ <ul style="list-style-type: none"> ●ハイタイプ ●スタンダードタイプ ●ミニタイプ●SSタイプ | Mタイプ 4サイズ <ul style="list-style-type: none"> ●ハイタイプ ●スタンダードタイプ ●ミニタイプ●SSタイプ | Gタイプ 3サイズ <ul style="list-style-type: none"> ●ハイタイプ ●スタンダードタイプ ●ミニタイプ | Lタイプ 3サイズ <ul style="list-style-type: none"> ●ハイタイプ ●スタンダードタイプ ●ミニタイプ |
| 脚タイプ | 前脚 <p>歩行器の基本形 すべりにくい ゴム付き</p> | 前輪 <p>一方向に動く ストレートキャスター 一方向に固定されているのでゆっくり歩行できます。方向転換は歩行器とお身体を少しずつ動かします。</p> | 前輪 <p>360°回転するので方向転換もスムーズ</p> | <p>Mタイプ</p> <p>Gタイプ</p> <p>Lタイプ</p> | <p>Mタイプ</p> <p>Gタイプ</p> <p>Lタイプ</p> |
| | 後脚 | 後脚 <p>荷重がかかると ストッパーが作動 荷重をかけた状態(ストッパーが作動した状態)で歩行器を無理に動かさないでください。</p> | 後脚 <p>荷重がかかるとストッパーが作動 荷重をかけた状態(ストッパーが作動した状態)で歩行器を無理に動かさないでください。</p> | <p>Mタイプ</p> <p>Gタイプ</p> <p>Lタイプ</p> | <p>Mタイプ</p> <p>Gタイプ</p> <p>Lタイプ</p> |
| | 詳細は P.12 へ | 詳細は P.13 へ | 詳細は P.14 へ | 詳細は P.15 へ | 詳細は P.16 へ |

■ウォーカー専用アクセサリー 各タイプに付け替えてできます。

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | | | |
| 固定式 タイプセット(SAPS) ¥4,500 (税込¥4,950) | Cタイプセット(SACP) ¥9,500 (税込¥10,450) | Mタイプセット(SAMS) ¥13,000 (税込¥14,300) | Gタイプセット(SAGS) ¥16,000 (税込¥17,600) | Lタイプセット(SALS) ¥14,000 (税込¥15,400) |
| (前) 3インチ・プラスチック ストレートキャスター (後) ストッパー | (前) 3インチ・プラスチック スイングキャスター (後) ストッパー | (前) 3インチ・プラスチック スイングキャスター (後) 3インチ・プラスチック キャスター付ストッパー | (前) 4インチ・ワイド幅ゴム スイングキャスター (後) 4インチ・ワイド幅ツイン ゴムキャスター付ストッパー | (前) 5インチ・大型ゴム スイングキャスター (後) 3インチ・プラスチック キャスター付ストッパー |

交換用パーツ

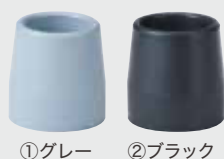

摩耗した脚先ゴムのまま使用すると、転倒の原因になります。定期的に交換しましょう。
**セーフティーアームシリーズ専用
 交換用脚先ゴムキャップ**
①SACCS ②SACCS-B
**¥1,800**(税込¥1,980)/4個セット
 ※色指定のない場合は、グレーでの出荷となります。
 ※バラ売りはできません。



グリップ部の摩耗や汚れが気になる場合、ドライバーでかんたんに交換できます。
**セーフティーアームシリーズ専用
 交換用グリップ**
①SAGPS ②SAGPS-B
**¥3,200**(税込¥3,520)/4個セット
 ※色指定のない場合は、グレーでの出荷となります。
 ※バラ売りはできません。


セーフティーアーム® ウォーカー

貸

介護保険適用
レンタル対象



室内・
屋外用
SSタイプのみ
室内専用

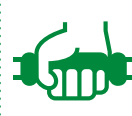

ハンドル
グリップ



4サイズ
あり



脚先調節

歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリになります。
下段グリップは床からの立ち上がりに便利。
用途に合わせて、専用アクセサリーの付け替えができます。

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.1~4・P.11・P.17を参照ください。)



セバレート
グリップ



2段
グリップ



コンパクト
収納

■スタンダードタイプ

4サイズ



①スタンダードタイプ

¥18,500 (非課税)

品番:SAWR 重量:2.8kg
収納時サイズ:W56×D11×H68cm

②ハイトタイプ

¥18,500 (非課税)

品番:SAWHR 重量:3kg
収納時サイズ:W58×D11×H77cm

③ミニタイプ

¥18,500 (非課税)

品番:SAWSR 重量:2.7kg
収納時サイズ:W54×D10×H60.5cm

④SSタイプ

¥17,500 (非課税)

品番:SAWSSR 重量:2.5kg
収納時サイズ:W45.5×D10.5×H60cm



室内専用

■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を持ち上げて前に出す。
- 3 身体を少しずつ移動する。

2~3の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



| サイズ表 | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高さ | 使用者身長 (目安) | ④下段グリップ 高さ | ⑤全幅 | ⑥奥行き |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| ①スタンダードタイプ | 48cm | 44cm | 66.5~76.5cm | 130~150cm | 34~44cm | 56~57cm | 43~45cm |
| ②ハイトタイプ | 48cm | 44cm | 75.5~85.5cm | 145~170cm | 37~47cm | 57.5~58.5cm | 44~46cm |
| ③ミニタイプ | 44cm | 40cm | 59~69cm | 115~135cm | 32~42cm | 53~54cm | 41~43cm |
| ④SSタイプ | 37cm | 33cm | 59~69cm | 115~135cm | 32~42cm | 46~47cm | 37~39cm |

※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

| | 商品名 | 品番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|----------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー | SAWR | ¥18,500(非課税) | 4515914-200379 | 00465-000036 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイトタイプ | SAWHR | | 4515914-302509 | 00465-000099 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニタイプ | SAWSR | ¥17,500(非課税) | 4515914-200478 | 00465-000037 | ④ |
| ④ | セーフティーアームウォーカーSSタイプ | SAWSSR | | 4515914-200690 | 00465-000043 | |

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム

セーフティーアーム® ウォーカーCタイプ

貸
介護保険適用
レンタル対象

ストレートキャスターの前輪とストッパーの付いた後脚の
室内専用タイプ。ゆっくり歩行をサポートします。
方向転換も自分のペースで。



室内専用



ハンドル
グリップ



4サイズ
あり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.1~4・P.11・P.17を参照ください。)



セパレート
グリップ



荷重
ブレーキ



ストレート
キャスター



2段
グリップ



コンパクト
収納

■スタンダードタイプ

4サイズ



①スタンダードタイプ

¥25,000

(非課税)
品番:SAWCR 重量:3.1kg
収納時サイズ:W60×D11×H73.5cm

③ミニタイプ

¥25,000

(非課税)
品番:SAWCSR 重量:2.9kg
収納時サイズ:W57×D10×H66cm

②ハイタイプ

¥25,000

(非課税)
品番:SAWCHR 重量:3.3kg
収納時サイズ:W61×D11×H82.5cm

④SSタイプ

¥24,000

(非課税)
品番:SAWCSSR 重量:2.7kg
収納時サイズ:W49×D10.5×H65.5cm

車輪サイズ

前輪・・・3インチ(7.5cm)

後脚・・・ストッパー


■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



| サイズ表 | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高さ | 使用者身長 (目安) | ④下段グリップ 高さ | ⑤全 幅 | ⑥奥行 |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| ①スタンダードタイプ | 48cm | 44cm | 71.5~81.5cm | 140~160cm | 39~49cm | 56~57cm | 49~51cm |
| ②ハイタイプ | 48cm | 44cm | 80.5~90.5cm | 155~180cm | 42~52cm | 57.5~58.5cm | 49~51cm |
| ③ミニタイプ | 44cm | 40cm | 64~74cm | 125~145cm | 36.5~46.5cm | 54~55cm | 46~48cm |
| ④SSタイプ | 37cm | 33cm | 64~74cm | 125~145cm | 36.5~46.5cm | 46~47cm | 42~44cm |

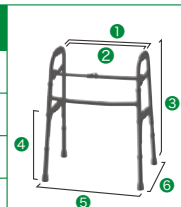

※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

| | 商品名 | 品 番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Cタイプ | SAWCR | ¥25,000(非課税) | 4515914-200577 | 00465-000025 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Cタイプ | SAWCHR | | 4515914-302608 | 00465-000047 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Cタイプ | SAWCSR | ¥24,000(非課税) | 4515914-200676 | 00465-000040 | ④ |
| ④ | セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ | SAWCSSR | | 4515914-200799 | 00465-000044 | |


[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属していません。

セーフティーアーム® ウォーカーMタイプ

貸
介護保険適用
レンタル対象



室内専用

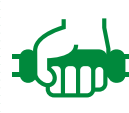

ハンドル
グリップ



4サイズ
あり



脚先調節

3インチプラスチックキャスターで軽量です。
そのため、持ち上げやすいので、ご家庭内のちょっとした
段差を越える際の持ち運び動作に便利です。

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.1~4・P.11・P.17を参照ください。)



セパレート
グリップ



荷重
ブレーキ



スイング
キャスター



2段
グリップ



コンパクト
収納

■スタンダードタイプ

4サイズ



①スタンダードタイプ

¥28,500

(非課税)
品番:SAWMR 重量:3.5kg
収納時サイズ:W63×D11×H76.5cm

③ミニタイプ

¥28,500

(非課税)
品番:SAWMSR 重量:3.3kg
収納時サイズ:W61×D10×H68cm

②ハイトタイプ

¥28,500

(非課税)
品番:SAWMHR 重量:3.7kg
収納時サイズ:W64.5×D12×H85cm

④SSタイプ

¥27,500

(非課税)
品番:SAWMSSR 重量:3.1kg
収納時サイズ:W52×D12.5×H68cm

車輪サイズ

前輪・・・3インチ(7.5cm)

後輪・・・3インチ(7.5cm)


■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけて
ストッパーを作用させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2~4の動作を繰り返すことで
歩行をサポートします。



| サイズ表 | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高 さ | 使用者身長 (目安) | ④下段グリップ 高さ | ⑤全 幅 | | ⑥奥行き |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | | 前 側 | 後 側 | |
| ①スタンダードタイプ | 48cm | 44cm | 73.5~83.5cm | 140~165cm | 41~51cm | 56~56.5cm | 61~62cm | 52~54cm |
| ②ハイトタイプ | 48cm | 44cm | 82.5~92.5cm | 160~185cm | 44~54cm | 57.5~58.5cm | 63~64cm | 52~54cm |
| ③ミニタイプ | 44cm | 40cm | 66~76cm | 130~150cm | 39~49cm | 54~54.5cm | 59~60cm | 50~52cm |
| ④SSタイプ | 37cm | 33cm | 66~76cm | 130~150cm | 39~49cm | 46~47cm | 51~52cm | 46~48cm |

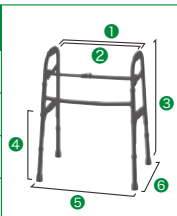

※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

| | 商品名 | 品 番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Mタイプ | SAWMR | ¥28,500(非課税) | 4515914-200775 | 00465-000039 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Mタイプ | SAWMHR | | 4515914-302707 | 00465-000048 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Mタイプ | SAWMSR | ¥27,500(非課税) | 4515914-200874 | 00465-000041 | ④ |
| ④ | セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ | SAWMSSR | | 4515914-200898 | 00465-000045 | |

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。

セーフティーアーム® ウォーカーGタイプ

貸
介護保険適用
レンタル対象



室内・
屋外用



ハンドル
グリップ



3サイズ
あり



脚先調節

4インチキャスターの6輪タイプ。キャスター幅が広いので溝などにはまりにくく、さらにツインゴムキャスター付きストッパーで、地面にしっかり接地するので、安定性にすぐれています。屋外での使用にもおすすめです。

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.11~4・P.11・P.17を参照ください。)



セパレート
グリップ



荷重
ブレーキ



スイング
キャスター



2段
グリップ



コンパクト
収納

■スタンダードタイプ

3サイズ



①スタンダードタイプ

¥31,500 (非課税)

品番:SAWGR 重量:4.8kg
収納時サイズ:W64×D13.5×H82.5cm

②ハイタイプ

¥31,500 (非課税)

品番:SAWGHR 重量:5kg
収納時サイズ:W66×D13.5×H91.5cm

③ミニタイプ

¥31,500 (非課税)

品番:SAWGSR 重量:4.5kg
収納時サイズ:W62×D13.5×H75cm

車輪サイズ

前輪・・・4インチ(10cm)

後輪・・・4インチ(10cm)


■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



| サイズ表 | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高さ | 使用者身長 (目安) | ④下段グリップ 高さ | ⑤全 幅 | | ⑥奥行き |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | | 前 側 | 後 側 | |
| ①スタンダードタイプ | 48cm | 44cm | 79.5~89.5cm | 155~175cm | 47~57cm | 60~61cm | 67~68cm | 57~59cm |
| ②ハイタイプ | 48cm | 44cm | 88.5~98.5cm | 170~190cm | 50~60cm | 61.5~62.5cm | 68.5~69.5cm | 57~59cm |
| ③ミニタイプ | 44cm | 40cm | 72~82cm | 140~165cm | 44.5~54.5cm | 57.5~58.5cm | 64.5~65.5cm | 55~57cm |

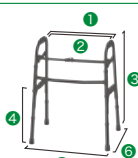

| | 商品名 | 品 番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Gタイプ | SAWGR | ¥31,500(非課税) | 4515914-201178 | 00465-000038 | ③ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Gタイプ | SAWGHR | | 4515914-302905 | 00465-000046 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Gタイプ | SAWGSR | | 4515914-201277 | 00465-000027 | ③ |

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。

セーフティーアーム® ウォーカーLタイプ

貸

介護保険適用
レンタル対象



室内・
屋外用



ハンドル
グリップ



3サイズ
あり



脚先調節

5インチ・ゴムスイングキャスターと3インチ・プラスチックキャスター付きストッパー。大型タイヤで溝にはまりにくく、エレベーターなどがある施設や病院での使用にも便利。また、屋外でも使用できる歩行器で少しでも軽いものをご希望の場合におすすめです。

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.1~4・P.11・P.17を参照ください。)



セパレート
グリップ



荷重
ブレーキ



スイング
キャスター



2段
グリップ



コンパクト
収納

■スタンダードタイプ

3サイズ



①スタンダードタイプ

¥29,500 (非課税)

品番:SAWLR 重量:3.8kg
収納時サイズ:W66×D11×H82.5cm

②ハイタイプ

¥29,500 (非課税)

品番:SAWLHR 重量:4kg
収納時サイズ:W67.5×D12×H91.5cm

③ミニタイプ

¥29,500 (非課税)

品番:SAWLSR 重量:3.7kg
収納時サイズ:W64×D11×H74.5cm

車輪サイズ

前輪・・・**5インチ**(12.5cm)

後輪・・・**3インチ**(7.5cm)

■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



| サイズ表 | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高さ | 使用者身長 (目安) | ④下段グリップ 高さ | ⑤全 幅 | | ⑥奥行き | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
|------------|---------|---------|--------------------|------------------|---------------|-----------|-------------|---------|----------------------------|
| | | | | | | 前 側 | 後 側 | | |
| ①スタンダードタイプ | 48cm | 44cm | 79.5~89.5cm | 155~175cm | 47~57cm | 58~58.5cm | 62~63cm | 55~57cm | |
| ②ハイタイプ | 48cm | 44cm | 88.5~98.5cm | 170~190cm | 50~60cm | 59.5~60cm | 63.5~64.5cm | 55~57cm | |
| ③ミニタイプ | 44cm | 40cm | 72~82cm | 140~165cm | 44.5~54.5cm | 56~56.5cm | 60~61cm | 53~55cm | |

| | 商品名 | 品 番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|-----------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Lタイプ | SAWLR | ¥29,500 (非課税) | 4515914-200973 | 00465-000017 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Lタイプ | SAWLHR | | 4515914-302806 | 00465-000100 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Lタイプ | SAWLSR | | 4515914-201079 | 00465-000054 | ④ |

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、前輪:合成ゴム、後輪:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属していません。

セーフティーアーム®

貸
介護保険適用
レンタル対象



室内・
屋外用



ハンドル
グリップ



2サイズ
あり



脚先調節

歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリになります。
プッシュボタンでフレームを「ハの字型」に広げると、
座位保持や立ち上がり用の手すりとしてサポートします。

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.1~4・P.11・P.17を参照ください。)



セパレート
グリップ



2段
グリップ



コンパクト
収納

■スタンダードタイプ

2サイズ



①スタンダードタイプ

¥18,500 (非課税)

品番:SAR-C 重量:2.7kg
収納時サイズ:W56×D10×H71.5cm

②ハイタイプ

¥18,500 (非課税)

品番:SAHR 重量:2.9kg
収納時サイズ:W57×D11×H81cm

■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を持ち上げて前に出す。
- 3 身体を少しずつ移動する。

2~3の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

手すりとしても大活躍

歩行時の「コの字型」から、フレームを広げて「ハの字型」にすると、トイレの前に置き立ち上がり用の手すりとして、また車いすからベッドへの移乗用の手すりとしても便利です。



| サイズ表 | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高さ | 使用者身長 (目安) | ④下段グリップ 高さ | ⑤全幅 | | ⑥奥行き | ⑦ |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------|
| | | | | | | 前側 | 後側 | | |
| ①スタンダードタイプ | 47cm | 43cm | 70~80cm | 135~160cm | 36~46cm | 55~56cm (ハの字:最大103cm) | 60~61.5cm (ハの字:最大103cm) | 43~45cm | ①②③④⑤⑥⑦ |
| ②ハイタイプ | 47cm | 43cm | 79.5~89.5cm | 155~175cm | 37~47cm | 57~58cm (ハの字:最大107cm) | 64~65.5cm (ハの字:最大107cm) | 43.5~45cm | |

| | 商品名 | 品番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|----------------|-------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアーム | SAR-C | ¥18,500(非課税) | 4515914-302301 | 00465-000016 | ④ |
| ② | セーフティーアームハイタイプ | SAHR | | 4515914-300611 | 00465-000097 | ④ |

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム

セーフティーアーム®の基本特長

ご利用者様の安全な歩行をサポートする機能がいっぱいです。



脚先調節タイプ

脚先パイプをスライドさせ
プッシュボタンで固定します。
調節はかんたん。5段階調
節可能。



セパレートグリップ

ゴム製なので滑りにくく、
しっかり握ることができ、
ドライバーでかんたんに交
換できます。



2段グリップ

歩行時の上段グリップと床
からの立ち上がりには便利
な下段グリップ付き。



コンパクト収納

左右のフレームを交互に折
りたたみ、コンパクトに収納、
持ち運びに便利。



丈夫な25mmパイプ

本体フレームには丈夫な
25mmの太パイプを使用。

セーフティーアーム® 交互式

貸

介護保険適用
レンタル対象



室内・
屋外用



ハンドル
グリップ



2サイズ
あり



脚先調節

左右の握り手を交互に動かして移動する交互式歩行器。
コンパクトサイズなので、ご家庭内でのご使用や、
歩行訓練器として施設などにおすすめです。

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.1~4・P.11・P.17を参照ください。)



セバレート
グリップ




2段
グリップ



コンパクト
収納

■スタンダードタイプ

2サイズ

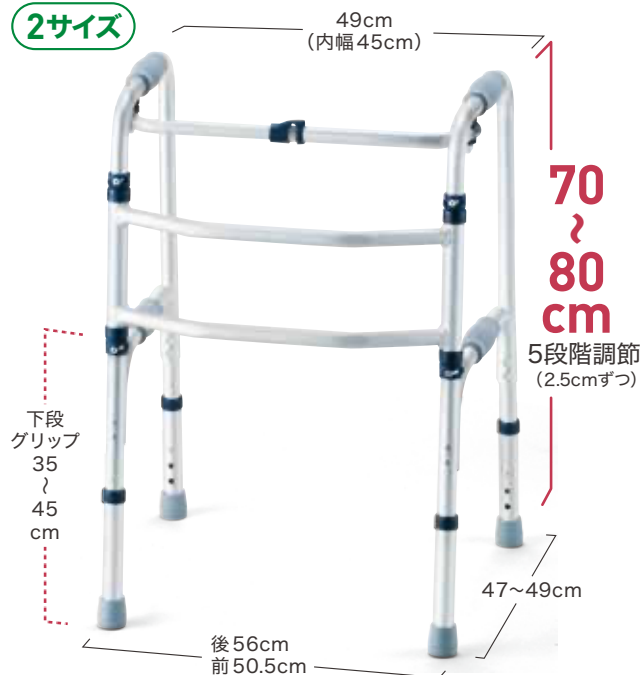

①スタンダードタイプ

¥18,500 (非課税)

品番:KSAR-C 重量:3.1kg
収納時サイズ:W51×D9×H72cm

②ハイトタイプ


¥18,500 (非課税)

品番:KSAHR 重量:3.2kg
収納時サイズ:W53×D12×H81.5cm

■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 右フレームの移動。左足を前に出す。
- 3 左フレームの移動。右足を前に出す。

2~3の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

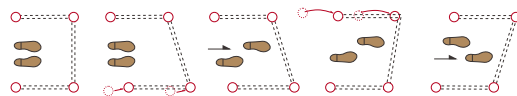

歩行訓練器としてだけでなく日常歩行にも

立位のバランスが取りにくい場合などや、正しい歩行パターンを習得するために、交互式は歩行訓練器として、よく使用されます。またフレームを片側ずつ動かすので、完全に自立する必要がなく、ゆっくり歩行する方にもおすすめです。



| サイズ表 | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高さ | 使用者身長 (目安) | ④下段グリップ 高さ | ⑤全幅 | | ⑥奥行き |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| | | | | | | 前側 | 後側 | |
| ①スタンダードタイプ | 49cm | 45cm | 70~80cm | 135~160cm | 35~45cm | 50.5cm | 56cm | 47~49cm |
| ②ハイトタイプ | 50cm | 46cm | 79.5~89.5cm | 155~175cm | 37~47cm | 53cm | 57cm | 47.5~49cm |

| | 商品名 | 品番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|--------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアーム交互式 | KSAR-C | ¥18,500(非課税) | 4515914-302400 | 00465-000018 | ④ |
| ② | セーフティーアーム交互式ハイトタイプ | KSAHR | | 4515914-300918 | 00465-000098 | ④ |

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム ※セーフティーアームウォーカー専用アクセサリは取り付けできません。

4点ステッキSタイプ

貸

介護保険適用
レンタル対象

1本杖では歩行が不安な方におすすめのステッキ。右手用・左手用の切り替えも可能。



①ブラック

¥7,000 (非課税)

品番:FS4-B 重量:750g

②シルバー

¥7,000 (非課税)

品番:FS4-C 重量:750g

交換用
パーツ

4点ステッキ専用交換用脚先ゴムキャップ
Sタイプ(FS4CCS)
¥1,400(税込¥1,540)/4個セット
※バラ売りはできません。

ご使用にあたって

4点ステッキは脚が4本あり、1本杖より支持面積が広く安定性がありますが、4本脚全てが地面に接していないとバランスを崩し、転倒するおそれがありますので、十分にご注意ください。

| | 商品名 | カラー | 品番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|------------|------|-------|-------------|----------------|--------------|---|
| ① | 4点ステッキSタイプ | ブラック | FS4-B | ¥7,000(非課税) | 4515914-200751 | 00465-000020 | ⑫ |
| ② | | シルバー | FS4-C | | 4515914-200652 | 00465-000020 | |

[材質]本体:アルミ、台座:スチール、グリップ:ウレタン