

浴槽用手すり マスカット ポールタイプⅡ



お風呂のお悩みありませんか？

- ☑湯船に浸かりたいけど、浴槽を安全に跨げない・・・
- ☑立ち座りに不安がある・・・
- ☑浴室と脱衣所の段差が不安だ・・・



マスカットが解決します！

様々な動作をサポートします！！



側面跨ぎ



正面跨ぎ



立ち座り

目的に合わせた設置が可能！！

様々な浴槽形状に対応！！



マスカット ポールタイプⅡ MP2000-31C

TAIS	00254-000390
本体価格	44,000円(税込)
介護保険1割負担	4,400円(税込)
介護保険2割負担	8,800円(税込)
介護保険3割負担	13,200円(税込)



きぬせん福祉用具研究会

〒273-0021 千葉県船橋市船橋市海神4-9-18


☎ : 047-433-1012

☎ : 047-433-1034





設置可能な浴槽


浴槽縁の厚みが4~14cmの範囲内

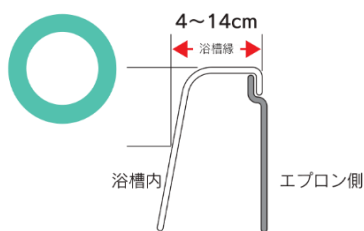


リムの高さが2cm以上

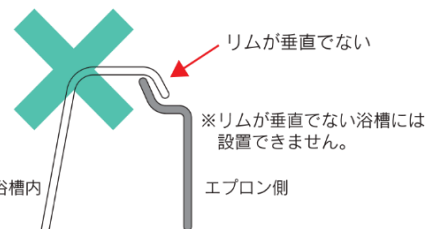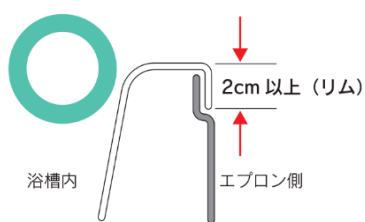


エプロンの幅がリムより3cm以内

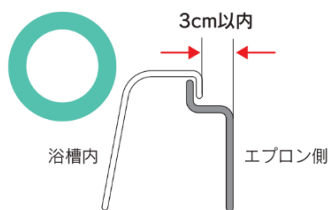

浴槽縁の高さが25cm~65cm以内

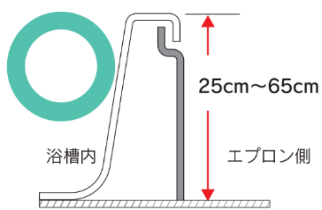

コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内

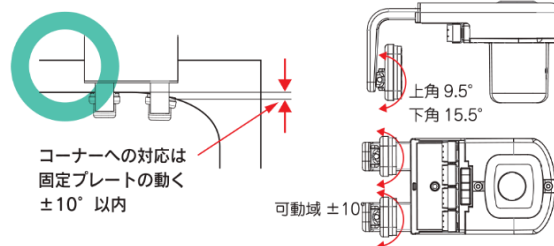

実際の設置例




エプロン外段差



縁広浴槽その1



洗面台一体型ユニットバス

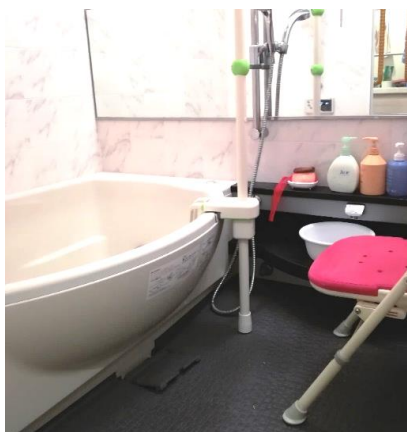

お椀型浴槽



縁広浴槽その2



カーブ浴槽

詳細
パンフレットは
こちら




浴槽用手すり

マスカット[®]

PAT.P

介護保険特定
福祉用具購入対象

ポールタイプ II

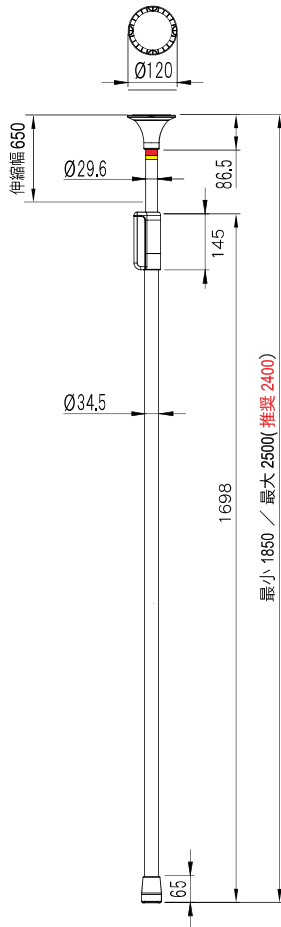

長いレバーで楽々ロック



脱着可能カバーで作業性アップ



横ずれ防止機能

DIPPER ホクメイ

マスカット・ポールタイプの特徴

安全

ユニットバスに取り付け可能な縦型手すり「マスカット」ポールタイプ。天井への負荷が小さく、浴槽のエプロンを触ることなく取り付けが可能です。

安心

直径 35mm の握りやすいポールと、手の位置を安定して固定するグリップボールの採用で、またぎ動作や立ち座り動作をサポートします。

快適

腰に負担をかけず、前傾しない姿勢で方向転換やまたぎ動作を、無理なく安定した姿勢で足上げ動作や屈伸動作を行えるなど、安全な浴室での動作をサポートします。



側方またぎ




正面またぎ



立ち座り動作補助

設置可能な浴槽・強度試験

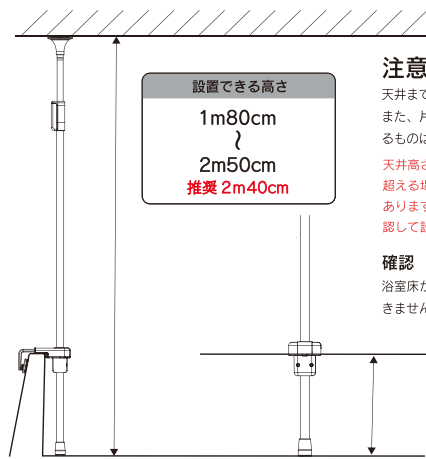


注意

天井までの高さを確認してください。
また、片流れの天井やドーム天井、点検口や天井が浮き上がるものは設置できません。

天井高さは2m50cmまで対応しますが、推奨の2m40cmを超える場合、天井の強度によって設置が不安定になる場合があります。天井の強度を確認し、本体のスレなどがないか確認して設置してください。




確認

浴室床から浴槽縁までの距離が25cm未満の浴槽には設置できません。

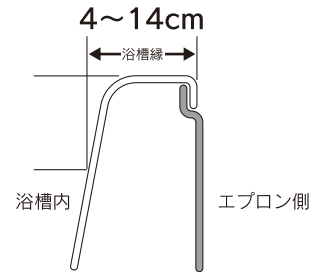

浴槽縁の厚みが4~14cmの範囲内




リムの高さが2cm以上

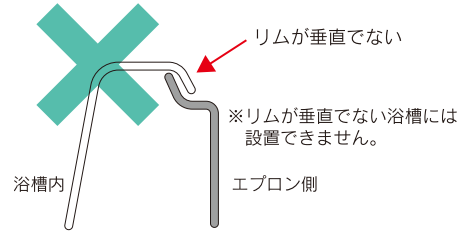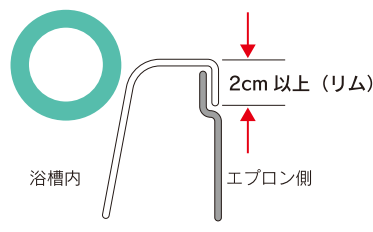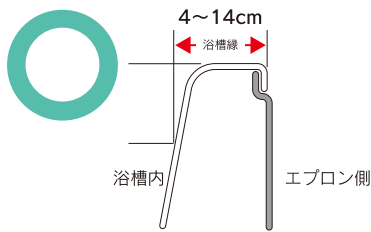

エプロンの出幅がリムより3cm以内

浴槽縁の高さが25cm~65cm以内

コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内

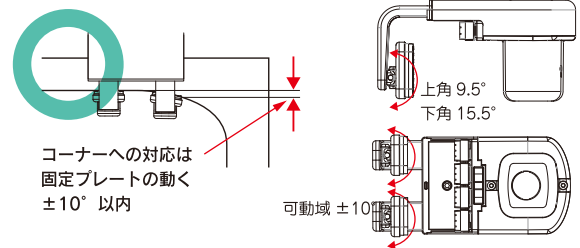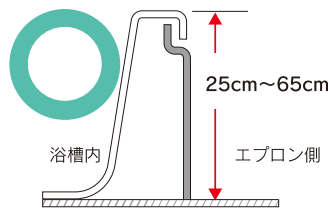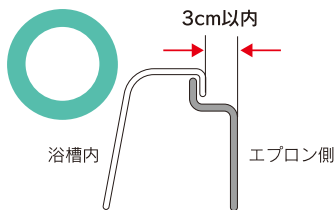


注意

設置条件の範囲内の場合でも、長期間の使用や浴槽の劣化等によって設置に不具合が出る可能性があります。もし、使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、指定事業者にご連絡してください。


「マスカット」荷重試験・仮想衝撃試験

マスカットポールタイプを用いてユニットバスに設置し、浴槽床を水平方向に近い状態で引っ張り、変形、破損の状態を計測する。

■ 980.665N (≒100kgf) 荷重試験

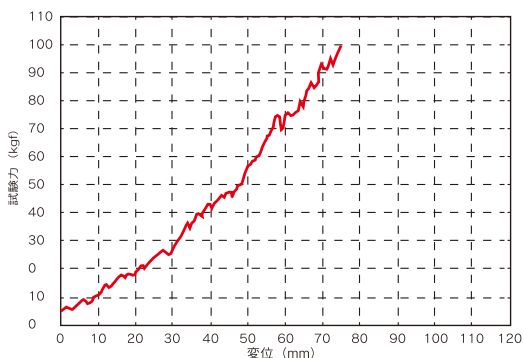

■ 980.665N (≒100kgf) 仮想衝撃試験

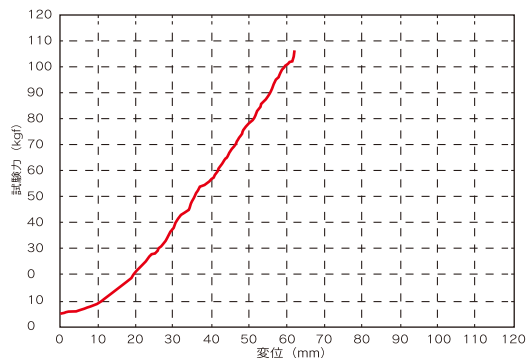

強度試験動画 QRcode

マスカット ポールタイプ

1




取り付け位置の浴槽縁幅を計測します。

2




アームの長さを調節し挟み込み本体を浴槽縁に置きます。取り付け作業を行い易くする為、挟み込み本体のカバー蓋を取り外します

3

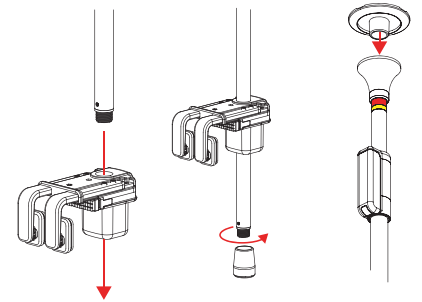

挟み込み本体にポールを通し、ポールに脚キャップと天井キャップを取り付けます。

5-1

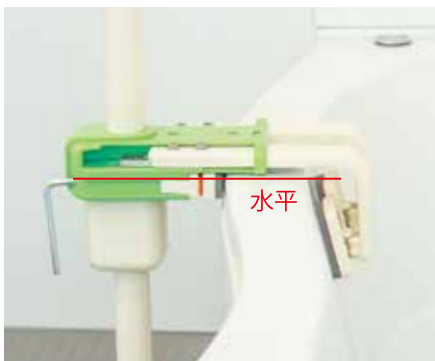

水平が維持されている事に注意しながらアーム締め付けボルトを締めます。

5-2 リム側



リムゴムの後ろの隙間がなくなるまでアームを締めます。



6



天井ベースの剥離紙をはがし、内ポールを天井まで伸ばします。

7

ロックレバー側



ロックレバーを下ろした後、レバーを上げ、長さを短くします。

7-2 天井側



レバーを降ろして、上部の赤いリボンが消えていることを確認します。



取り付け手順

4





挟み込み本体にポールを通し、パイプ固定ボルトを軽く締めて仮止めをします。

4-2

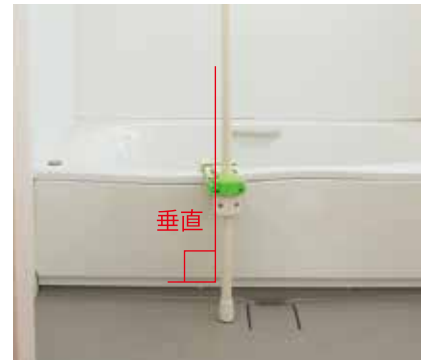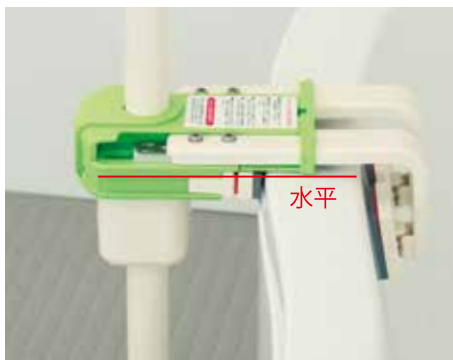

挟み込み本体が水平に、ポールが垂直に取り付けられていることを確認します。


5-3 アーム側

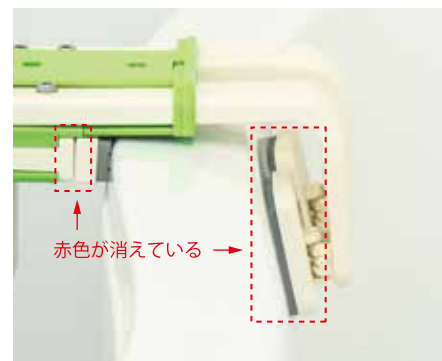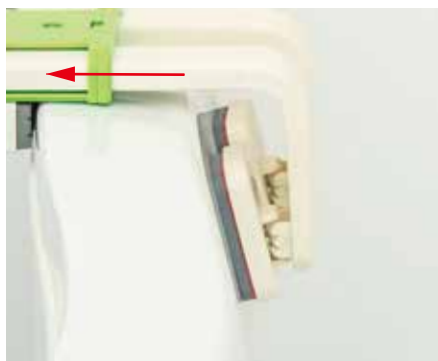

アームが浴槽側からズレないように押さえ、固定プレートを挟み込み本体を寄せていくイメージで固定プレートの赤ラインが消えるまでアームを締めます。

6-2 と 6-3 を交互に締め付けていきます。

8

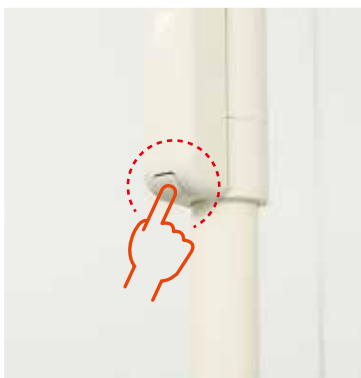

ロックボタンを押します。

9



パイプ固定ボルトを増し締めします。
(締めすぎに注意)

10



挟み込み本体にカバーを取り付けます。




挟み込み本体の左右にズレ止めを貼ります。

実際の設置例



お椀型浴槽

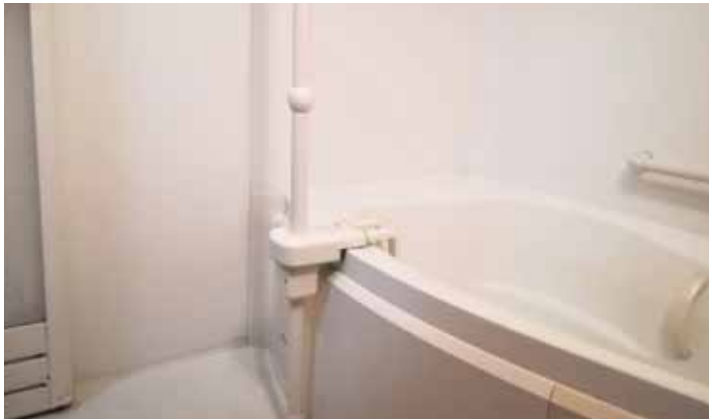

エプロン外段差（プラス段差）




人工大理石タイルコート



浴槽縁の内側がカーブしている浴槽



カーブ浴槽

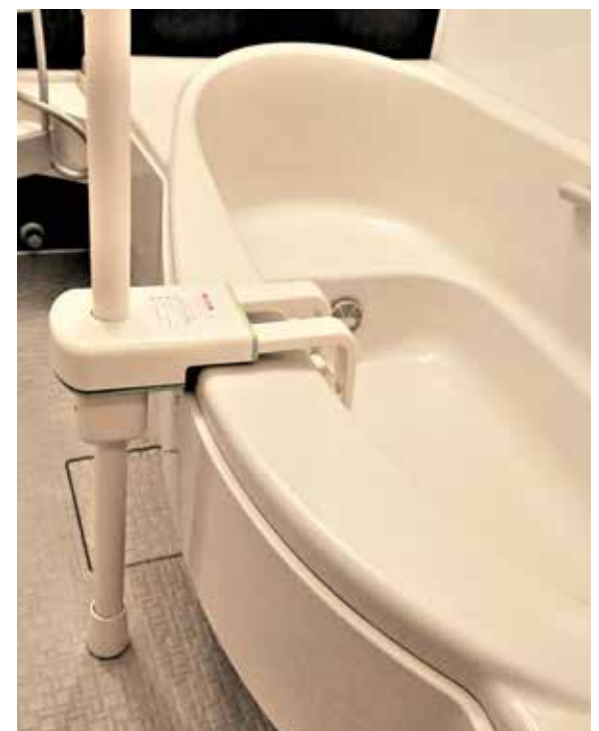

縁広浴槽



エプロンに強度がない浴槽



浴槽縁の幅の幅違い（大）



エプロンに強度がないプラス段差の浴槽



エプロン外段差（プラス段差）

マスカットポールタイプII



無機抗菌剤・練込
パイプ被覆、カバー、下カバー、固定プレート
ロックレバー外観部

▲ 注意事項

SIAA マークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。



●MP2000
TAIS:00254-000387
¥42,900 (税込)
¥39,000 (税抜)



●MP2000-100
(滑り止め付き)
TAIS:00254-000388
¥43,450 (税込)
¥39,500 (税抜)



●MP2000-200
(グリップホワイト2個付き)
TAIS:00254-000389
●MP2000-210
(グリップグリーン2個付き)
TAIS:00254-000390
¥44,000 (税込)
¥40,000 (税抜)



●MP2000-300
(滑り止め・グリップホワイト2個付き)
TAIS:00254-000391
●MP2000-310
(滑り止め・グリップグリーン2個付き)
TAIS:00254-000392
¥44,550 (税込)
¥40,500 (税抜)



●MP2000-800
(リングアーム：グリーン付き)
TAIS:00254-000393
¥56,100 (税込)
¥51,000 (税抜)



●MP2000-810
(リングアーム：ベージュ付き)
TAIS:00254-000394
¥56,100 (税込)
¥51,000 (税抜)



●MP2000-900
(リングアーム：グリーン付き)
TAIS:00254-000405
¥57,200 (税込)
¥52,000 (税抜)



(滑り止め)



(グリップ グリーン) (グリップ ホワイト)



(リングアーム・グリーン)



(リングアーム・ベージュ)

製造元 **ホクメイ株式会社**

総販売元 **DIPPERホクメイ株式会社** 〒544-0001 大阪市生野区新今里2-4-1 TEL06-6754-0625 (代表)

home page <http://www.dipper-hokumei.co.jp/>

■カタログの商品の仕様・価格は改良の為、予告なく変更する場合があります。■カタログの写真は印刷の為、多少実物とは色が異なります。